

# MANUALE D' USO- INSTRUCTION MANUAL


































## STAR SISTEMA PER AEROSOLTERAPIA AEROSOL THERAPY SYSTEM

0,4  
ml/min  
Veloci e efficaci  
Fast and effective



5  
Garanzia 5 anni  
5 year warranty

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FIG. A

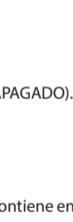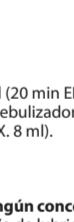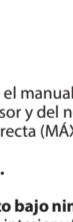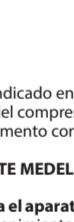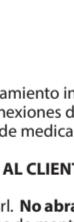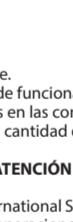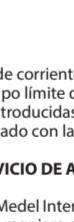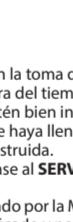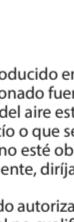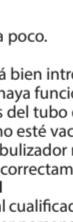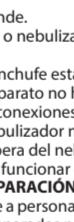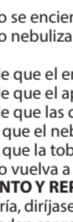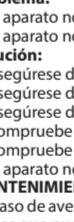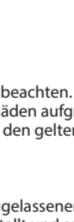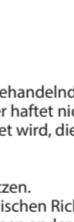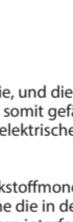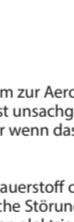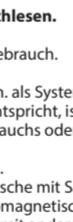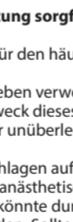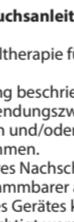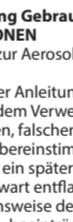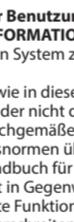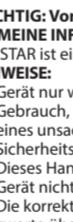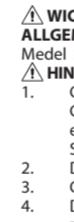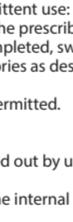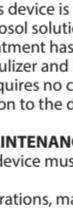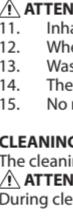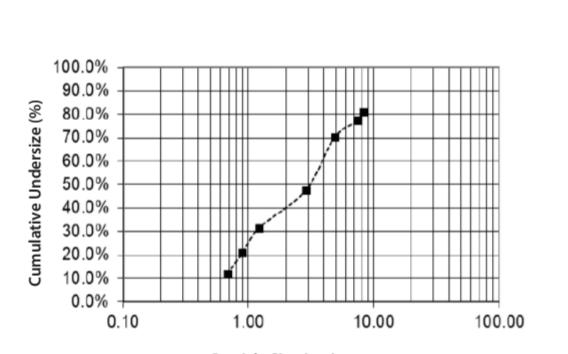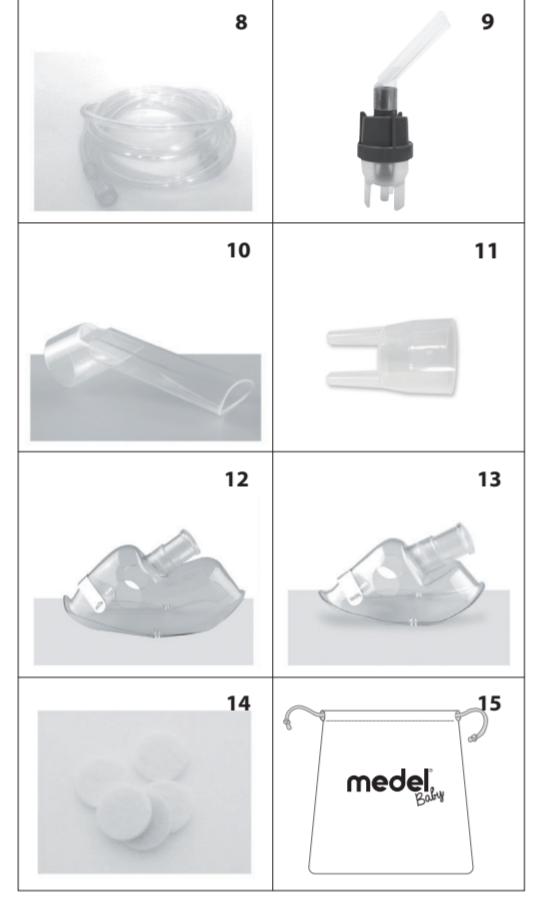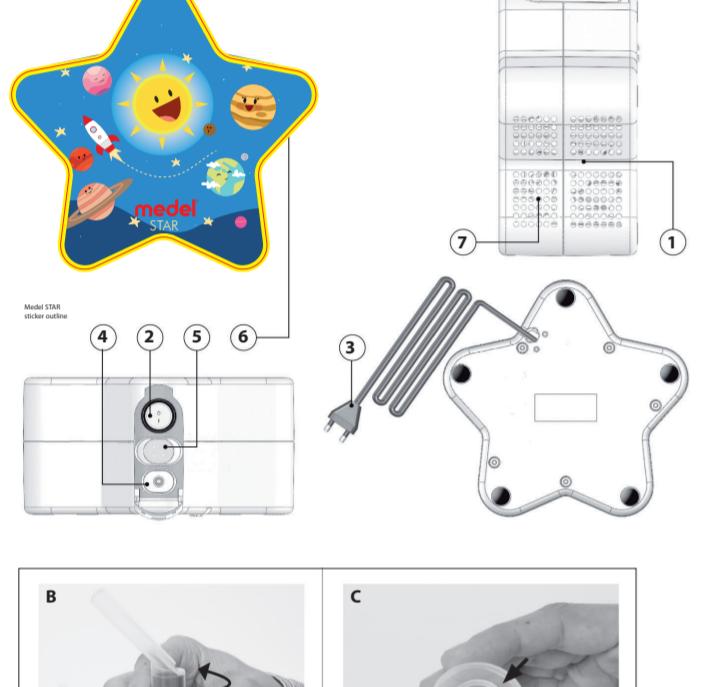

**IT COMPONENTI - FIG. A**

- 1 Sede del compressore
- 2 Interruttore ON/OFF
- 3 Cavo di alimentazione
- 4 Uscita per filtri
- 5 Porta-filtro

**IMPORTANTE:** Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

INFORMAZIONI GENERALI / INDICAZIONI D'USO

Medel STAR è un sistema per aerosolterapia indicato per uso domestico.

### AVVERTENZE

1. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale e quindi come sistema per aerosolterapia, seguendo le indicazioni del proprio medico. Ogni uso diverso da ciò non è consigliabile e dovrà essere evitato e potrebbe risultare pericoloso e quindi qualsiasi ricorso non può essere considerato responsabile per danni causati da imprecisione, errore e trascuratezza o se l'apparecchio è utilizzato in impianti elettrici non conformi alle vigenti norme di sicurezza.

2. Conservare questo manuale per ogni ulteriore consultazione.

3. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di persone con disabili, epilessia, crisi convulsive, febbre, febbre alta, febbre sotto i 38°C.

4. In caso di guasti, tenere l'apparecchio con tutti gli dispositivi elettrici, spostarlo e connetterlo ad una diversa presa elettrica.

5. Per operazioni di pulizia rinvigolirsi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può essere causa di rischio per la sicurezza dell'apparecchio.

6. Rispettare sempre le norme specifiche per le apparecchiature elettriche ed in particolare:

- utilizzare solo accessori e componenti originali;

- non rimuovere l'apparecchio quando si è in corso di trattamento;

- non bagnare l'apparecchio con acqua calda o fredda;

- non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide;

- durante il trattamento non appoggiare l'apparecchio su superficie controllate e stabili;

- l'impiego di questo apparecchio da parte di bambini è disabilità richiede sempre la supervisione di un adulto con piena facoltà mentale;

- non è permesso l'uso di aerei, ossigeno o nitrogeno.

7. Prima di utilizzare l'apparecchio, procedere alle operazioni di disinfezione come descritte nel capitolo "PULIZIA E DISINFETZIONE DEGLI ACCESSORI".

8. Durante l'installazione, sedere in posizione eretta e rilassata al di sotto del cono di condizionamento dell'aria situato all'interno del nebulizzatore (Fig. G).

9. Dopo aver tolto l'apparecchio dalla confezione, controllare che non siano presenti danni visibili; prestare particolare attenzione ad incrinature nella plastica che potrebbero lasciare scoperte alcune componenti.

10. Ricordare di non utilizzare l'apparecchio se si è in corso di trattamento della polmonite.

11. Verificare se il nebulizzatore funziona correttamente.

12. Non posizionare l'apparecchio in modo che non sia difficilmente scollegabile dalla spina.

13. Terminato il trattamento, spegnere l'apparecchio mettendo l'interruttore I/O in posizione «0» e staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica.

14. Pulire il nebulizzatore e i suoi accessori come descritto nel capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE".

15. L'apparecchio non richiede la calibrazione.

16. Non ammessa alcuna modifica al dispositivo.

**INSTRUZIONI PER L'USO**

1. L'apparecchio va controllato prima di ogni utilizzo, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o danni dovuti al trasporto e/o immagazzinamento.

2. Durante l'installazione, sedere in posizione eretta e rilassata ad un livello minimo.

3. Prima di utilizzare l'apparecchio, procedere alle operazioni di disinfezione come descritte nel capitolo "PULIZIA E DISINFETZIONE DEGLI ACCESSORI".

4. Aprire il nebulizzatore, ruotando la vite di serraggio del cappuccio del cono di condizionamento dell'aria.

5. Versare la quantità di fumetto indicata dal fabbro.

6. Ricongiungere la nebulizzazione.

7. Ricongiungere il nebulizzatore.

8. Ricongiungere il nebulizzatore.

9. Se si desidera utilizzare la maschera, inserirla direttamente sull'uscita dell'aria (Fig. G).

10. Inserire la spina d'alimentazione in una presa elettrica, facendo attenzione che l'alimentazione di rete corrisponda ai dati di targa dell'apparecchio.

11. Preparare il trattamento, mettendo l'interruttore I/O in posizione «0».

12. L'apparecchio deve essere sostituito dopo circa 10-12 trattamenti.

13. Verificare se l'apparecchio funziona correttamente.

14. Ricongiungere la nebulizzazione.

15. Ricongiungere il nebulizzatore.

16. Ricongiungere il nebulizzatore.

17. Ricongiungere la nebulizzazione.

18. Ricongiungere il nebulizzatore.

19. Ricongiungere la nebulizzazione.

20. Ricongiungere la nebulizzazione.

21. Ricongiungere la nebulizzazione.

**INSTRUZIONI PER L'USO**

1. L'apparecchio va controllato prima di ogni utilizzo, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o danni dovuti al trasporto e/o immagazzinamento.

2. Durante l'installazione, sedere in posizione eretta e rilassata ad un livello minimo.

3. Prima di utilizzare l'apparecchio, procedere alle operazioni di disinfezione come descritte nel capitolo "PULIZIA E DISINFETZIONE DEGLI ACCESSORI".

4. Aprire il nebulizzatore, ruotando la vite di serraggio del cappuccio del cono di condizionamento dell'aria.

5. Versare la quantità di fumetto indicata dal fabbro.

6. Ricongiungere la nebulizzazione.

7. Ricongiungere il nebulizzatore.

8. Ricongiungere il nebulizzatore.

9. Se si desidera utilizzare la maschera, inserirla direttamente sull'uscita dell'aria (Fig. G).

10. Inserire la spina d'alimentazione in una presa elettrica, facendo attenzione che l'alimentazione di rete corrisponda ai dati di targa dell'apparecchio.

11. Preparare il trattamento, mettendo l'interruttore I/O in posizione «0».

12. L'apparecchio deve essere sostituito dopo circa 10-12 trattamenti.

13. Verificare se l'apparecchio funziona correttamente.

14. Ricongiungere la nebulizzazione.

15. Ricongiungere il nebulizzatore.

16. Ricongiungere la nebulizzazione.

17. Ricongiungere il nebulizzatore.

18. Ricongiungere la nebulizzazione.

